

da Vinciチェックリスト

● 基本情報

					回
日付	/ /	患者氏名		術式	
患者ID		性別	M: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/>	術者	
使用科		年齢		CE/Nsサイン	/

1.準備(前日 or 当日朝)		2.電源ON・フォーミング(前日 or 当日朝)	
SC・VC・PCは正しく配置	OK・NG	PCを立ち上げ、アームを展開	OK・NG
SCはフットペダルが下がっている	OK・NG	アーム展開後、PCの電源を切る	OK・NG
PCのロックがDになっている	OK・NG	SC・VC・PCをシステムケーブルで接続	OK・NG
VCがロックされている	OK・NG	VCをON。システムが正常に立ち上げるか	OK・NG

3.電気メス・LAN接続(前日 or 当日朝)		4.気腹装置(当日朝)	
電気メスとの接続ケーブルの確認	OK・NG	CO2ポンベを空ける(目盛2で交換)	OK・NG
LANケーブルを壁端子に接続	OK・NG	予備ポンベがある事を確認	OK・NG
		電源を立ち上げ、スタンバイ状態にする	OK・NG

5.ドレーピング(Ns確認項目)		6.3Dカメラ・スコープ(Ns確認項目)	
ディスクノッチの位置を確認	OK・NG	ホワイトバランスを取る	OK・NG
テープの位置を確認	OK・NG	0° スコープの3Dアライメント調整	OK・NG
カメラアームスイットスポット中心に矢印がある	OK・NG	30° スコープの3Dアライメント調整(up/down)	OK・NG
カメラアームと支柱が一直線になっている	OK・NG	アライメントタグに挿入されている	OK・NG
		イルミータをON(曇り止め)	OK・NG

7.録画準備		8.術中	
モニタに映像は映っている	OK・NG	VCを移動し、電メスの接続・ケーブルを保護	OK・NG
患者情報等を入力し、HDをセット	OK・NG	気腹装置の送気を開始	OK・NG
SCに鮮明に映像を見れる事を確認	OK・NG	録画を開始	OK・NG

9.術後	
インストゥルメントアームの使用回数の表示	OK・NG
ランプ稼働時間	hr
装置の清拭	OK・NG
DVDへのコピーが完了し看護師へ渡す	OK・NG
アームを収納し、PCの電源をOFF	OK・NG
ケーブルを整理し収納(破損がない事も確認)	OK・NG
SC・PC・VCを所定の位置に戻す	OK・NG
PCを充電	OK・NG
SC1に電源をつなぎ、シュミレータと接続されている	OK・NG
SC・PC・VCが確実にロックされている	OK・NG