

[トップページ](#) [製品紹介](#) [泌尿器製品](#) [DIBキャップ](#)

URO DIB™

URO DIBはバリアフリーのコンセプトに基づいてQOLの向上を実現しました。

URO DIB™で3つの安全

- シンプル構造で扱いやすい
- 細やかな感染対策
- 少量廃棄物で環境対応

DIBキャップ

国際特許取得

■ 製品の特徴

- 簡単操作でバルーンカテーテルより排尿ができます。
- 装着後は片手で、しかも弱い力でキャップの開閉ができます。
- 外出時や入浴時に採尿袋をつける必要がありません。
- キャップの開閉は磁力を使用していますので、漏れの心配がありません。
- 退院時の膀胱訓練に最適です。
- 他社メーカーのカテーテルにも接続することが可能です。
- 尿バッグを使用する場合は別売の専用アタッチメントをご使用下さい。



■ 用途

1. 尿路用カテーテルのキャップ
2. 外瘻用チューブのキャップ
3. その他カテーテル用のキャップ

■ 使用上の注意

- バルーンカテーテルの排尿部に深く差し込んでしっかり入っているか確認してください。（サイズが合わない場合は使用できません。）
- マグネット部のキャップ部分に他の物が挟まらない様に使用してください。
- キャップを開放にして不潔になった場合、あるいはキャップ部分に尿の白い結晶が付着した場合は消毒液のついた清潔な綿等で拭いて下さい。
- 金属製人口骨等の金属物質を体内に埋め込んでいる人は使用しないで下さい。
- 他の医療機器（MRI, 輸液ポンプなど）に近づけて使用しないでください。
- 使用する際に、時計、磁気カード等、磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
- 交換時期の目安は約1ヶ月です。



この溝までカテーテルに差し込んでください。

■ 仕様

製品番号		包装単位
400100	DIBキャップ B (青色)	10個/箱
400103	DIBキャップ H (肌色)	10個/箱

■ よくあるお問い合わせ

**D I Bキャップについて、よくある質問や問題の解決方法を紹介します。
弊社製品ご使用の参考・目安にしてください。**

Q D I Bキャップとはどういうものですか？

A 導尿用のくだ（以下バルーンカテーテル）のふたです。

Q どのようにして使えばいいの？

A 今ご使用のバルーンカテーテルの栓と、取り替えるだけです。D I Bキャップを深く差し込んで、後は排尿の際に、フタを開閉するだけです。



Q どのバルーンカテーテルにもつかえますか？

A D I Bキャップは、メーカー、サイズ、材質を選ばず使用できます。

Q 尿パックを使っているのですが、外出時や入浴時に使えますか？

A D I Bキャップは構造的にフタを開めると完全にシールされていますので水の中でも大丈夫です。外出時、入浴時、リハビリ訓練時にたいへん便利です。また、D I Bキャップと尿パックを接続するためのアタッチメントも別にご用意しております。

Q バルーンカテーテルを使っていますが、おしっこを出すとき、栓を抜くのに苦労したり落としたりしていましたが、D I Bキャップはどうですか？

A そのような利用者の声を聞いて、このD I Bキャップは生まれました。DIBキャップはマグネット式で簡単に開閉できますので、“キャップの栓を抜く”ということはありません。

Q D I Bキャップのフタが、自然に開いてしまうことはありませんか？

A フタのソデ部のスリットを本体のポッチに押し込んでください。通常フタが開いてしまうことはありません。（フタの部分にものがはさまったり、衣服が引っかからないように注意すれば大丈夫です。）

Q どのくらいの期間使用できますか？

A 1ヶ月で新しいD I Bキャップと交換してください。

シリコーン アタッチメント

- ・本製品はDIBキャップ専用アタッチメントです。
- ・DIBキャップと採尿袋を繋ぐプラグです。
- ・他メーカーの採尿袋にも接続可能です。

交換時期の目安は約1ヵ月です。



■ 仕様

製品番号

400203

シリコンアタッチメント

包装単位

10個/箱

EOG滅菌済み

■ 詳しい使用方法はこちらから



■ お問い合わせ・カタログ請求について

本ページ掲載中の製品について、ご不明な点やご質問等、どうぞお気軽にお問い合わせください。また、ご希望をお申し付け下されば、カタログをお送りいたします。

→ [お問い合わせ、カタログご希望はこちらから](#)

Copyright © DIB International All Rights Reserved.